

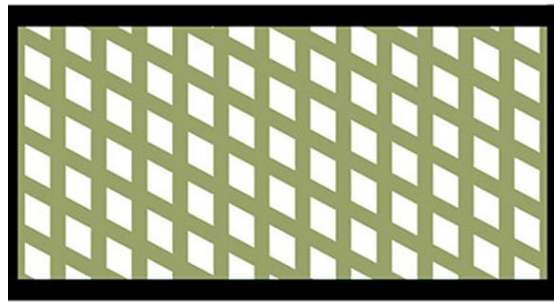


راهنمای تفسیر تست بوویدیک – BD Green Card

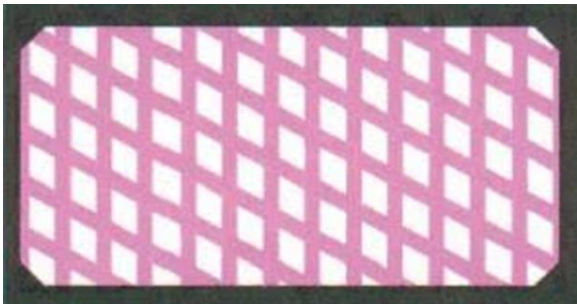


پاس (بدون خطا)


تست اولیه ارغوانی رنگ است در بهترین سیکل استریل به سبز تغییر می کند.

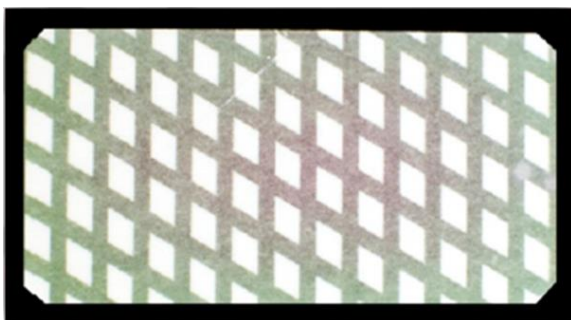


پاس نشده (خطای کوچک)

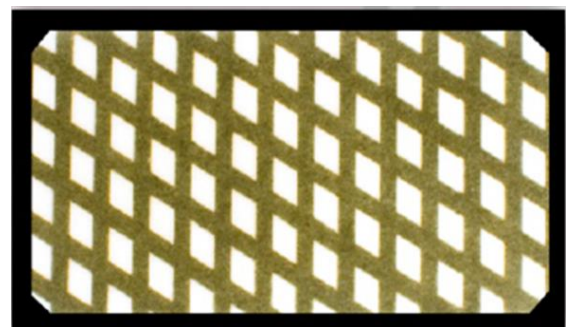


پاس (زمان و کیوم و خشک کردن را کوتاه نمایید)

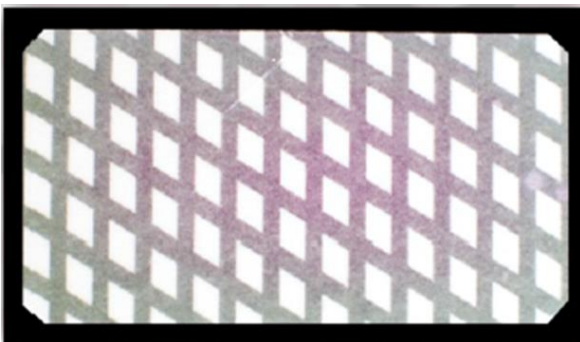

پاس نشده (خطای متوسط)

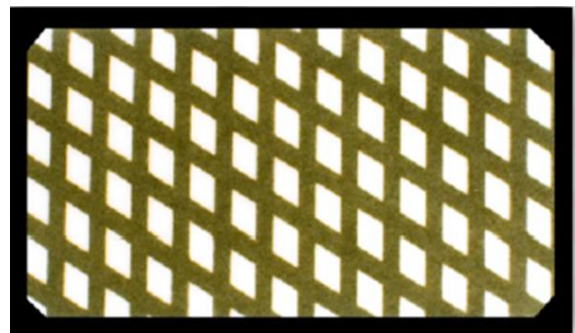

پاس (زمان و کیوم و خشک کردن بسیار طولانی است. زمان و کیوم را
را به ۵ دقیق کاهش دهید)

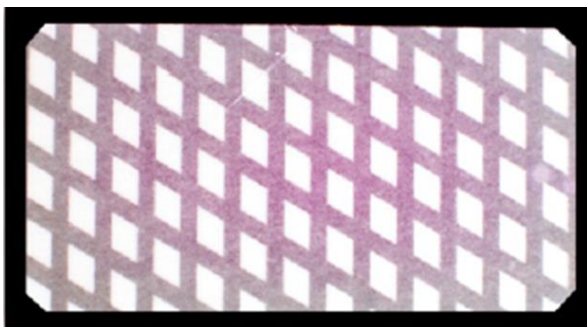

پاس نشده (خطای بزرگ)



پاس (پاشیدن آب بصورت اسپری. و کیوم دستگاه خوب کار نمی کند)

